




HØRSELSKONTAKTEN

Nr. 9 Mars 2000

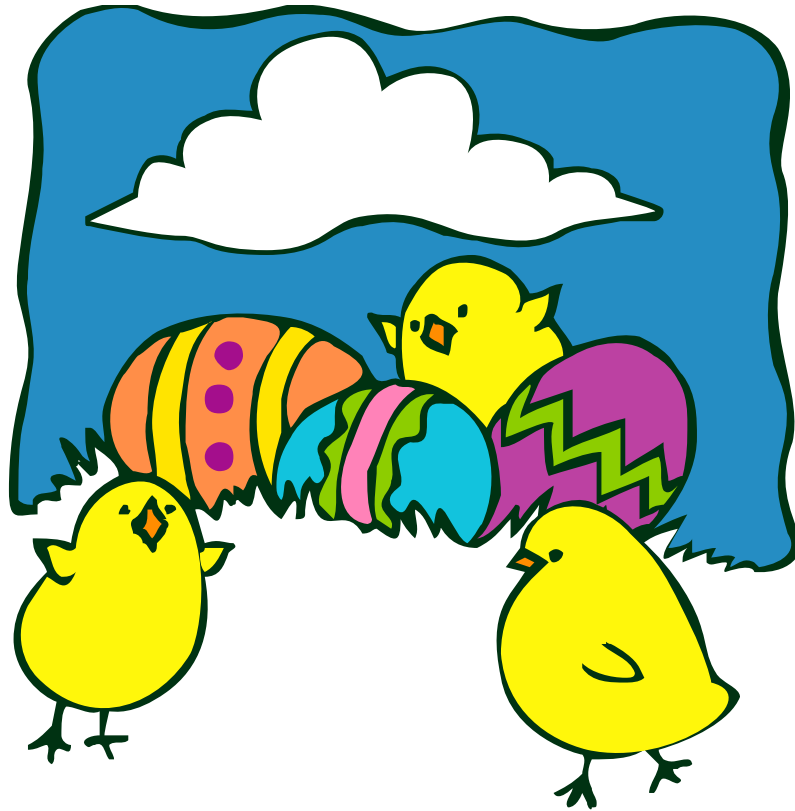

Vi ønsker våre lesere en riktig god påske!





HØRSELSKONTAKTEN er et informasjonsblad til de kommunale hørselskontaktene i Nordland. Utgiver er Hjelpemiddelsentralen i Nordland og Hørselssentralen, Nordland sentralsykehus. Redaktør: Jan Erik Israelsen

Vi tar gjerne imot stoff fra hørselskontaktene, og tips om ting som vi bør ta opp.
Adresse: **Hørselssentralen, Nordland sentralsykehus, 8092 Bodø**



Nytt varslingshjelpemiddel

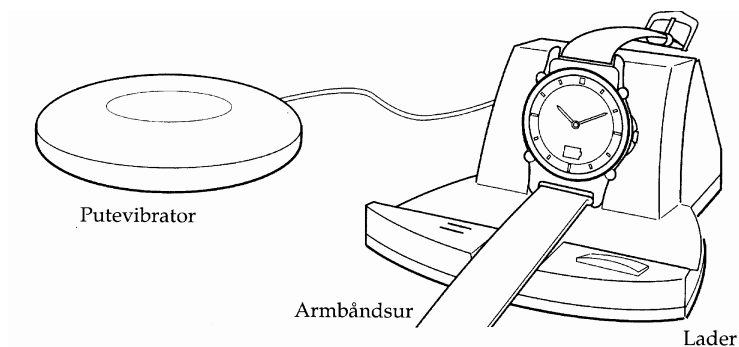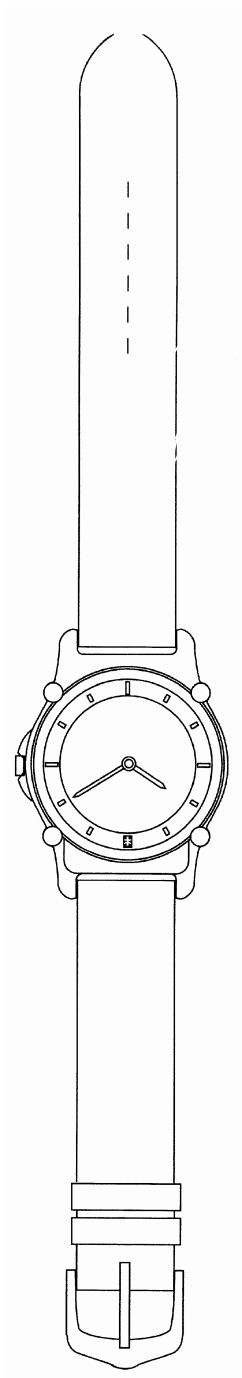

Nytt, diskret varslingshjelpemiddel er kommet på markedet – armbåndsur **DanAlert TACTUM**.

TACTUM gir brukeren full bevegelsesfrihet og bæres på håndleddet. Det viser riktig tid med visere som på et vanlig ur. Armbåndsuret gir varsling ved tydelige *vibrasjoner* som er ulike for opptil sju forskjellige varslingspunkter. Årsaken til varslingen vises med forskjellige symboler på urskiven (dør, telefon, brann osv.). **TACTUM** er fortsatt aktiv under oppladingen, men vil da varsle via putevibratoren.

Hvem passer **TACTUM** for?


I utgangspunktet kan vi si at **TACTUM** passer godt for aktive personer.

Under formidlingsprosessen må imidlertid den mest hensiktsmessige hjelpemiddelløsningen for den aktuelle brukeren bli valgt. Riktig hjelpemiddelløsning bør vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Oticon høreapparater


Oticon har nå kommet med en ny, kraftig ørehenger – **Oticon DigiFocus Power**.

Den er digital, men har både volumkontroll og **M-MT-T**-funksjon.

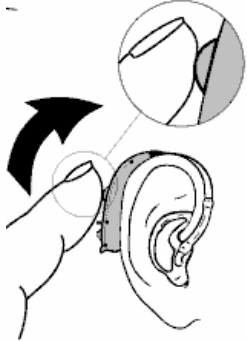

Volumkontrollen ser ut som et vanlig ”styrkehjul”. Når hjulet skyves oppover, økes forsterkningen. Når hjulet skyves nedover, minker forsterkningen. Det som er spesielt, er at hjulet ikke har noe stoppunkt. Du kan skru samme vei ”i det uendelige”. Men forsterkningen justeres bare det antall trinn som er programmert, deretter skjer det ingen ting, uansett hvor mye du

skrur. Slås apparatet av, starter apparatet alltid i ”normalstilling”.

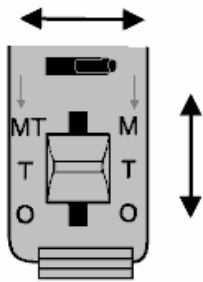


Bryteren/funksjonsvelgeren er merket **M-T-0** på den ene siden, og **M-MT-0** på den andre. Med en liten skyvebryter over den vanlige bryteren velges **MT** (bryteren mot venstre) eller **M** (skyvebryteren mot høyre). Med **MT**-funksjon er både mikrofon og telespole er koplet inn samtidig.

Oticon har også endret bryterfunksjonen for å kople inn telespole på de digitale alt-i-øret-apparatene. I stedet for å trykke på batteriskuffen, er det nå kommet en trykkbryter.

Når apparatet slås på – ved å lukke batteriskuffen – står apparatet i **M**-stilling. Trykkes det en gang på trykkknappen, står apparatet i **T**-stilling. Trykkes det en gang til på knappen, står apparatet igjen i **M**.

Det er også mulig å legge inn **MT**-funksjon her. Da vil trykk på knappen gi følgende funksjonsendring:


M → MT → T → M osv.

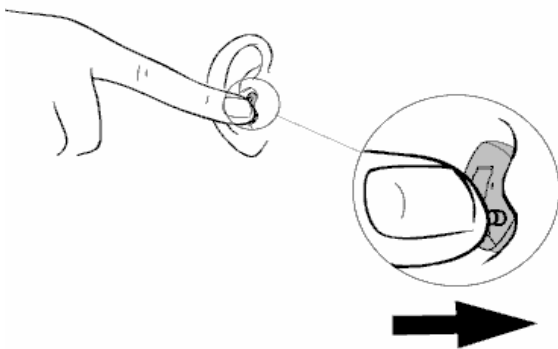

Noen av de digitale alt-i-øret-apparatene fra Oticon har også fått volumkontroll.

Det betyr at dere kan finne alt-i-øret-apparater med:

- bare batteriskuff (*forsterkningen reguleres seg automatisk, det er ingen telespole*).
- med batteriskuff og trykkknapp (*forsterkningen reguleres automatisk, apparatet har telespole*).
- med batteriskuff, trykkknapp og volumkontroll (*som over, men apparatet har også manuell forsterkningsregulering*).

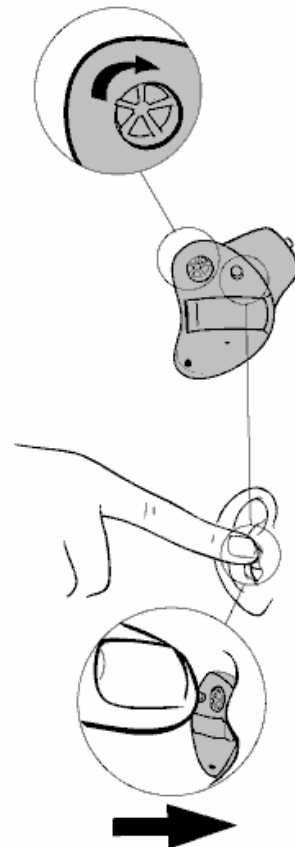

Adressat:

B

Nytt fra Hørselssentralen

Ventelister

Det er ingen bedring i ventetiden for høreapparatpasienter. Verst ute er nyhenviste – personer som ikke har hatt høreapparater tidligere. For denne gruppen er ventetiden i dag ca 22 måneder. Høreapparatbrukere med høreapparater som er eldre enn seks år, og yrkesaktive som ikke har høreapparater, må vente om lag et år på time. De som har lavest prioritet, er de med høreapparater som ikke er seks år gamle, og som ønsker å prøve noe nytt. Skal disse komme i betraktning, må henvisende lege beskrive hvilke forhold som gjør at vedkommende ikke lenger fungerer med høreapparatene sine.

Med de lange ventelistene, er det viktig at henvisende lege beskriver den hørselshemmedes problemer så reelt som mulig, og slik gjør opp merksom på personer som ut fra ulike forhold bør prioriteres.

Reisebudsjett og høreapparatkurs

HØRSELSKONTAKTEN har tidligere meldt at Hørselssentralen har fått eget reisebudsjett for å kunne drive brukeropplæring i Narvik, Gravdal, Mo og Sandnessjøen, og samtidig kunne ha tettere kontakt med hørselskontaktene. Når det har vært stille fra audiopedagog Liv Grethe Heffermehl, skyldes det at reisebudsjettet henger i en tynn tråd – kanskje blir det bråstopp på reisevirksomheten.

Uansett ser det ut til at Hørselssentralen kan tilby kurs i bruk og stell av høreapparater til i alle fall fire kommuner i år – hvilke er ikke bestemt enda - i forbindelse med et prosjekt i regi av Sintef Unimed. Da betaler Sintef reiseregningene!

Adresseendring


Her kommer en endring i den tilsendte adresselisten over høreapparatimportører (se **HØRSELSKONTAKTEN** nr. 8 1999). Audiotronics A/S har flyttet.

Ny adresse er:

**Postboks 103 Stovner
0913 Oslo**

Tlf.: 22 21 93 50

Faks: 22 21 93 59

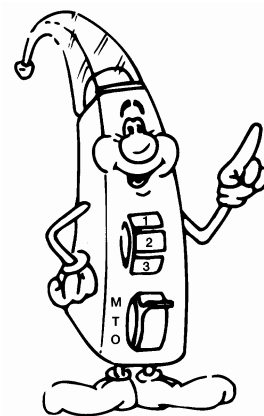

Nytt privat tilbud

Nordland har fått et nytt privat tilbud for høreapparattilpasning – **Hørselsspesialisten i Nordland**.

Hørselsspesialisten består av audiograf Tone-Lise Carlsen. Hun samarbeider med øre-nese-halsspesialist Viggo Bøckmann ved Nordland Medisinske Senter, som er ansvarlig for den medisinske undersøkelsen i forbindelse med tilpasningen.

Adresse til Hørselsspesialisten:
Urtegårdsgaten 19, 8007 Bodø
Telefon 75 52 32 26