



# God sommer!

Flere av dere ønsker å få vite mer om ulikt rense- og hygieneutstyr til høreapparater og ørepropper. Så selv om det er ferietid, vil HØRSELSKONTAKTEN vie dette nummeret til en presentasjon av produkter og forhandlere.

Hjelpemiddelsentralens Hørselsseksjon og Hørselsentralen vil samtidig benytte anledningen til å ønske våre lesere en god sommerferie.



**HØRSELSKONTAKTEN** er et informasjonsblad til de kommunale hørselskontaktene i Nordland. Utgiver er Hjelpemiddelsentralen i Nordland og Hørselssentralen, Nordland sentralsykehus. Redaktør: Jan Erik Israelsen

Vi tar gjerne imot stoff fra hørselskontaktene, og tips om ting som vi bør ta opp.  
Adresse: **Hørselssentralen, Nordland sentralsykehus, 8092 Bodø**



## Rengjøring av ørepropper



Et **rensesett** for ørepropper består av rensetabletter eller renevæske, en beholder med sil for rengjøring av øreproppen, og en blåseball.

Det finnes tre ulike typer rensesett på det norske markedet – **Hadeo**, **O-Purgat** og **Cedis**. Den største forskjellen er at O-Purgat og Cedis benytter tabletter som løses opp i vann, mens Hadeo



også kan leveres med et flytende rengjøringsmiddel som fås både konsentrert (mix) for utblanding i vann, og som ferdig utblandet væske (soft).





Blåseballen brukes til å blåse vann ut av lydkanal og slange etter vask.

Er høreapparatbrukerne plaget av kløe i ørene på grunn av øreproppene, kan plagene bli mindre dersom proppene rengjøres med rensetabletter eller renevæske beregnet til dette – i stedet for å bruke såpe eller andre vaskemidler.

## Rengjøring av øreproppen

Gjøres en gang i uken – oftere ved behov.

1. Ta proppen *med* slange løs fra høreapparatet.
2. Legg proppen og slangen i lunkent vann med rensetablett eller renevæske og la ligge i minst 15 minutter eller over natten.
3. Om det er ørevoks i kanalen kan piperenser eller annen tynn børste benyttes.
4. Skyll øreproppen godt i rennende vann til rensedemiddelet er borte.
5. Blås ut vannet fra kanalen i proppen. Press blåseballen ned i enden på slangen/kanalen og trykk hardt, slik at alt vann presses ut.
6. Tørk proppen godt. La gjerne proppen ligge og lufttørke.
7. Kontroller at proppen er tørr.
8. Monter slangen på apparatet. Om plastslangen er gul og hard – bytt den.

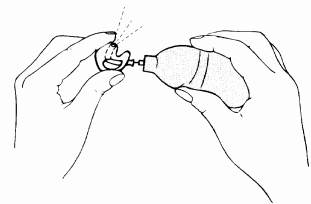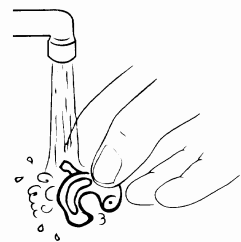

## Andre rengjøringsprodukter

### Våtservietter



Våtservietter kan brukes til rengjøring og desinfeksjon av både ørehengere og alt-i-øret høreapparater, samt til rengjøring av ørepropper. Daglig rengjøring av høreapparatene vil forebygge feil og forlenge levetiden. Det finnes våtservietter fra flere firma og i ulike pakningsstørrelser.

Våtservietter pakket enkeltvis i folie, for å holde på fuktigheten, leveres både av **Hadeo**, av Starkey (under navnet **AuraClean**), av samme leverandør som leverer

O-Purgat (under navnet **Despurgat**), og av **Cedis**.

I tillegg leverer **Hadeo** og **O-Purgat** våtservietter i boks. Denne kan være praktisk hvis forbruket er stort. Brukes serviettene sjelden, har de lett for å tørke ut.



### Tørkesett

Enkelte som oppholder seg mye i friluft i allslags vær, eller som har et arbeidsmiljø med høy høy luftfuktighet, damp el.l., kan ha behov for jevnlig tørking av høreapparatene

Tørkesettene leveres både av Dreve (samme som lager O-Purgat), Hadeo og Cedis. Begge settene baserer seg på at høreapparatet plasseres i en boks eller en tett plastpose sammen med en tørkekapsel som trekker til seg fuktighet. Apparatet bør ligge til tørking natten over.

NB: Ta ut høreapparatbatteriet før apparatet plasseres i tørkesettet. ❖

### Forhandlere og priser

Produkt	Pris	Forhandler
O-Purgat rensesett	kr. 79,30	Sykehusapoteket, NSS Tlf.: 75 53 40 66
O-Purgat rensetabletter (24 stk.)	kr. 47,30	
O-Purgat rensesett	kr. 72,00	AurisMed AS Tlf.: 33 46 09 60
O-Purgat rensetabletter (24 stk.)	kr. 43,00	
Blåseball	kr. 26,00	
Despurgat våtservietter (25 stk.)	kr. 28,00	
Tørkeboks (uten tørkekapsler)	kr. 28,00	
Tørkekapsler	kr. 42,00	Audiotek A/S Tlf.: 22 33 22 25
Hadeo rensesett (med mix rensesvæske og tørkesett)	kr. 169,00	
Hadeo konsentrert rensesvæske (mix)	kr. 39,50	
Hadeo rensetabletter	kr. 29,50	
Hadeo våtservietter (30 stk.)	kr. 67,00	
Hadeo tørkesett	kr. 63,50	
Hadeo tørkekapsler	kr. 37,50	
Blåseball	kr. 36,50	
AuraClean våtservietter (50 stk.)	kr. 35,00	Starkey Norge Tlf.: 22 40 48 20
Cedis hygienesett for ørehenger (rense- og tørkesett)	kr. 125,00	Medisan A/S, Tlf.: 22 59 90 40
Cedis hygienesett for alt-i-øret (våtservietter og tørkesett)	kr. 125,00	
Cedis våtservietter (90 stk.)	kr. 79,00	

Adressat:

# B

## Informasjon til døvblitte

Karlsrud voksenopplæringscenter og Døves Video har sammen laget et opplæringsprogram beregnet på personer som har mistet hørselen. Hovedtemaet er kommunikasjon når hørselen svikter, med bl.a. "tegn som støtte til tale" (TSS).

Det er en kombinasjon av folkeopplysning og undervisningsopplegg beregnet på grupper og selvstudium. Videofilmene – seks til sammen – er teksten. Det følger med et studiehefte.

Videofilmene kan bestilles fra Døves Video fra semesterstart til høsten.

Adressen til Døves Video er:

Døves Video, 3570 Ål

Tlf.: 32 08 26 50

E-post: [dvideo@online.no](mailto:dvideo@online.no)

